

VITA Easyshade® V, diş rengini doğru bir şekilde belirlemek için geliştirilmiş dijital bir spektrofotometredir. **Doğal dişler ve restorasyonlar** için kullanılabilir ve VITA SYSTEM 3D-MASTER, VITA classical A1-D4 ve BLEACHED SHADE GUIDE gibi uluslararası renk sistemlerini kapsar. Cihaz ayrıca Bluetooth bağlantısı ile bilgisayar ve mobil cihazlara veri aktarımı yapabilir.

1. Genel Özellikler ve Kullanım

- **Dijital Diş Renk Belirleme:** Doğal dişler ve seramik restorasyonlar için yüksek hassasiyetli ölçüm yapar.
- **Çalışma Modları:**
 - Doğal dişin temel rengini belirleme
 - Ortalama renk ölçümü
 - Diş alanı rengi belirleme (boyun, merkez, kesici uç)
 - Beyazlatma sonrası renk değerlendirme
 - Restorasyon rengini doğrulama
- **Ekrana ve Kullanım:** Dokunmatik ekran ile yönetilir, sezgisel bir kullanım sunar.

2. Kullanıma Başlama

- **İlk Kullanım:** Cihazı şarj istasyonunda **en az 12 saat** şarj edin.
- **Beyaz Dengesi (Kalibrasyon):** Doğru ölçüm için her kullanımdan önce otomatik beyaz dengesi yapılmalıdır.
- **Koruyucu Kap Kullanımı:** Hijyenik ölçüm için her hasta için yeni bir koruyucu kap kullanılmalıdır.

3. Renk Ölçümü ve Kayıt

- Ölçüm sonrası elde edilen renk değerleri ekranda VITA renk sistemleriyle görüntülenir.
- Ölçüm verileri cihaz hafızasına kaydedilebilir ve Bluetooth ile aktarılabilir.

4. Bakım ve Temizlik

- Cihazı dezenfekte etmek için **alkol içermeyen dezenfektan mendiller** kullanılmalıdır.
- **Sterilizasyon:** Kalibrasyon bloğu otoklavda sterilize edilebilir, ancak cihazın kendisi suya batırılmamalıdır.

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa / Toplam
MC.YD39	21.02.2025	----	00	1/1