

1. GİRİŞ VE AMAÇ

1.1. Kullanım Amacı

- Dynamix®speed 2, yalnızca **2 bileşenli hassas ölçü malzemelerinin** sıkılması ve kartıştırılması için tasarlanmıştır.

1.2. Malzeme Uyumluluğu

- Çeşitli üreticilerin **takviye kartuşlarında**
- 5:1 kartuş** veya **torbalar** ile kullanılabilir.

1.3. Karıştırma

- Malzemeyi karıştırmak için **altıgen başlı dinamik karıştırma uçları** kullanılır.

1.4. Güvenlik Uyarısı

- Üretici tarafından sağlanan **tüm güvenlik ve işletme talimatlarına** her zaman riayet ediniz.
- Yalnızca üretici tarafından belirlenen karıştırma uçları** kullanılabilir.

2. CİHAZIN HİZMETE ALINMASI (KURULUM)

2.1. Kurulum

2.1.1. Cihaz

- Duvara monte edilerek**
- Tezgâh üstü cihaz** olarak kullanılabilir.
- Stabil bir destek (altlık)** seçiniz.

2.2. Bağlantı ve Başlatma

- Cihazın **tip plaka etiketindeki bilgilerin**, elektrik şebekesi standartlarına uygun olduğundan emin olunuz.
- Birlikte verilmiş olan **güç kablosunu**,
- Şebeke bağlantı soketine** bağlayınız.
- Güç kablosunu **duvar tipi elektrik prizine** takınız.
- Cihazı **ana güç şalterinden** açınız.

2.3. Taşıma Kilidinin Kaldırılması

Cihazı çalıştırmadan önce taşıma kilidini kaldırınız.

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa / Toplam
MC.YD86	02/01/2025	----	00	1/3

- Cihazın **kapağını** kapatınız.
- **Geri çekme düğmesine** basınız.
- **Baskı diskleri** durunca ana konumlarına çekilirler.
- Cihazın kapağını açınız.
- **Taşıma kilidini** kaldırınız.

3. KULLANIM (OPERASYON)

3.1. Kartuş Takma ve Değiştirme

- Her iki **baskı diski** de ana konumdayken (geri çekilmişken) kartuşu:
- Takabilir veya değiştirebilirsiniz.
- Kartuşu **sürgünün altına yerleştirildiğinden** emin olarak cihaza takınız.
- **Karıştırma programını seçiniz.**
- Cihazın **kapağını** kapatınız.

3.2. Karıştırma Programı Seçimi

- **Programı** seçiniz.

3.2.1. Sembolsüz Malzemeler

- Bu sembolle işaretli olmayan tüm ölçü malzemeleri **“ST” Programı** ile işlenmelidir.

3.2.2. İşaretli Malzemeler

- **“Yıldız” veya “elmas”** sembolleriyle işaretlenmiş programlar;
- Yalnızca bu sembollerle işaretli **özel ölçü malzemeleri / kartuş sistemleri** ile kullanılmalıdır.

*****Not: Yanlış program kullanımı, malzemenin üretici garantili kalitesini sağlamayabilir.**

3.3. Malzeme Ekstrüzyonu (Sıkılması)

- İsteddiğiniz hız veya fonksiyona bağlı olarak:
- **Ölçü kaşığı** → hızlı sıkma
- **Dağıtıcı** → yavaş sıkma
- Besleme düğmesine basınız ve **basılı tutunuz.**
- **Baskı diskleri** ilerler.
- Seçilen hızda **malzeme sıkılır.**
- İstenen miktar karıştırılır karıştırılmaz, **Besleme Düğmesini Bırakınız.**

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa / Toplam
MC.YD86	02/01/2025	----	00	2/3

***** Önemli Not:** Yeni bir kartuş veya tekrar takılan kullanılmış bir kartuşta ilk 5 cm ölçü malzemesi kullanılmamalıdır.

4. TEMİZLİK VE BAKIM

4.1. İç Temizlik:

- Baskı diskleri geri çekilmişken
- **Kartuş yatağı** kolayca temizlenebilir.

4.2. Mil Yağmalama

Cihazın düzgün çalışması için:

- **Millere uygulanan gresi asla temizlemeyiniz.**

4.3. Temizleyici Maddeler

Islak bezle silmeye ek olarak:

- **Cihaza özel Yüzey Temizleme Mendilleri** kullanılmasına izin verilir.

4.4. Baskı Diski Değişimi

Aşınmış baskı diskleri;

- Yedek parça olarak mevcuttur.
- Gerektiğinde değiştirilmelidir.

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa / Toplam
MC.YD86	02/01/2025	----	00	3/3